



ADAPTAMOS
GROUP

SKI SHEET

ACOPLAR EL SKI SHEET AL COLCHÓN

Simplemente coloque el Ski Sheet sobre el somier y luego coloque el colchón encima. Fije el Ski Sheet al colchón mediante los lazos elásticos en las esquinas. Ajuste todo el conjunto y oculte los asideros de arrastre.

ALMACENAMIENTO DE LAS CORREAS

Guarde la cinta sobrante de las correas en los bolsillos de fácil acceso en los laterales del Ski Sheet.

Y ASÍ SE QUEDA

Fijado de forma no intrusiva pero segura al colchón.

LISTO PARA UN USO INMEDIATO

1. **Coloque almohadas** en el pecho y piernas del paciente antes de atar las correas para:
 - a) obtener un máximo de seguridad para el paciente
 - b) ajustar firmemente las correas sin oprimir el pecho del paciente.
2. **Saque las correas** de los bolsillos de almacenamiento (de fácil localización, junto a los lazos elásticos de fijación al colchón).
3. **Ajuste las hebillas** encima del paciente sin ganchos que se enganchen ni nudos que tenga que aprender
4. **Apriete las cinchas** al máximo hasta dar una forma de 'U' al colchón para:
 - a) envolver al paciente
 - b) evitar que el mismo se deslice
 - c) reducir la superficie de fricción
 - d) facilitar el arrastre





ADAPTAMOS
GROUP

5. Deslice el colchón de la cama

usando los lazos cruzados o los asideros. No hace falta levantarlo, simplemente guíe y controle el colchón, bajándolo de la cama (empezando por la parte de los pies), y deje que la gravedad le ayude.

Los asideros laterales optativos permiten un control incluso superior para mover pacientes pesados o aquellos que requieran un cuidado mayor.

Los asideros no son para levantar el colchón.

6. Arrástrelo hasta un lugar seguro

Una vez colocado en el suelo, el paciente puede ser arrastrado hacia un lugar seguro, incluso por personas no entrenadas.

Existe un asidero grande en cada extremo del Ski Sheet y el cuerpo de nilón reforzado del Ski Sheet tiene una resistencia de fricción tan baja que el paciente puede ser desplazado de forma rápida y fácil hacia un lugar seguro.

7. Incluso bajando escaleras

Encima de escaleras el colchón se deslizará casi solo, y no se requiere apenas estirar. Tire con una mano, mientras con la otra sujete la barandilla.

El paciente está protegido contra golpes y roces; una vez en un lugar seguro se le puede dejar envuelto en el colchón y sábanas hasta la llegada de servicios asistenciales.

¿EVACUACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL?

¡Con la lona de evacuación Ski Sheet lo podrá hacer!

Para la evacuación horizontal progresiva **use 'Ski Sheet'**, y en el caso de que el incendio se extienda, o por otra razón, además tendrá recursos para mover a los pacientes no ambulantes de forma rápida y fácil por las escaleras y salidas de emergencia hacia un lugar seguro. **Sin Ski Sheet, las escaleras y salidas de emergencia y de incendio podrían resultar ser obstáculos en vez de rutas de fuga en un momento crucial de la evacuación**, causando atascos o, peor todavía, caos y pánico.



Especificaciones:

Dimensiones: empaçado: 27 x 10 x 13 cm, desenrollado: 196 x 85 cm

Comprobado de seguridad: 250 Kg

Material: Nylon

Peso: 1 Kg

Códigos: SKISH01 (Estándar)

Lavado a maquina

No usar cloros

Tender para secar, o en secadora con poco calor

LAVADO: Cuando se requiera lavar, cierre las hebillas, pudiendo usar agua de hasta 80°C. Para proteger las hebillas se recomienda lavar dentro de una bolsa de lavadora. Aclare abundantemente para evitar que el detergente deje depósitos. Podrá añadir desinfectante al último aclarado si fuese necesario.

SECADO: Se recomienda secar a temperatura baja para evitar que el nilón se arrugue o encoje.

PLANCHADO: Si se han seguido las instrucciones precedentes, el planchado no debería ser necesario.